



Stago Canada Ltd / Stago Canada Ltée
251 Consumers Rd.
Suite 1200
Toronto, ON M2J 3R4
1-888-283-0175
www.stago.com

28 Février 2011

Sujet : Conditions de stockage du STA[®] Owren-Koller (réf # 00360)

Cher(e) client(e),

Cette information concerne le tampon STA[®] Owren-Koller réf # 00360. Après des investigations approfondies par notre Département Contrôle de Qualité, il a été déterminé que le tampon STA[®] Owren Koller devait être conservé à **2-8 °C** et non plus à 2-25 °C comme il l'était préconisé jusqu'à aujourd'hui. Cela permet à nos clients de standardiser les conditions de stockage pour tous les réactifs Stago afin d'en assurer les meilleures performances. Le premier lot faisant apparaître les nouvelles conditions de stockage est le lot # 106966. L'emballage (coffret, flacon et notice) indique clairement les nouvelles conditions de conservation. En raison de ce changement, un sticker sera apposé sur tous les coffrets de STA[®] Owren-Koller pour une durée d'environ 15 mois.

La notice va être modifiée telle que ci-dessous.

5/ STABILITE ET CONSERVATION DU REACTIF

Conservé à 2-8 °C sous son état d'origine, le réactif est stable jusqu'à la date de péremption indiquée sur le coffret.

Après ouverture, le réactif est stable :

- 3 jours sur STA Compact[®] et STA-R[®]
- 6 jours sur STA Satellite[®].

En cas d'utilisation fractionnée, la solution restante de STA[®] - Owren-Koller maintenue à 2-8 °C dans son flacon d'origine bouché, est stable, si non contaminée, jusqu'à la date de péremption indiquée sur le flacon.

Chez Stago Canada Ltée, nous prenons grand soin de nos produits et restons au service de nos clients. Nous vous remercions de votre fidélité et espérons répondre à toutes vos attentes.

Sincèrement,

Karen Wrona
Chef Produit Réactif