



Stago Canada Ltd/Stago Canada Ltée
251 Consumers Rd., Suite 1200
Toronto, Ontario (Canada)
M2J 3R4
Phone: 1-888-283-0175
info@stago.com
www.stago.com

28 février 2011

Objet : Créer un disque de sauvegarde sur l'analyseur STA Compact®

Cher client:

Veuillez suivre la procédure mentionnée ci-dessous pour créer un disque de sauvegarde sur votre analyseur STA Compact®. Si cette procédure n'est pas respectée, vous ne pourrez pas créer le disque avec succès. Il est recommandé de mettre en œuvre cette procédure de sauvegarde lors de la maintenance mensuelle ou lorsque des paramètres ont été modifiés. Veuillez vous référer à la section Maintenance dans le Manuel de référence du STA Compact® pour plus d'information.

Créer un disque de sauvegarde:

- Sélectionnez **Maintenance** dans le menu principal
- Dans le menu Maintenance Utilisateur, sélectionnez **Sauvegarde**
- Avec **Sélection des items** surligné, appuyez sur **Enter**
- Appuyez sur la barre d'espace pour sélectionner ou désélectionner un item sur la liste
 - o Sélectionnez **Configuration des tests** et **Paramètres système**
 - o **NOTE : NE PAS sélectionner Messages d'erreur. Ceci causera un échec dans la sauvegarde.**
 - o **NOTE : NE PAS sélectionner F8 pour sélectionner tous les objets**
- Lorsque ces deux objets sont sélectionnés, appuyez sur **F10** pour confirmer la sélection
- Insérez une disquette pré-formatée dans le lecteur de disquette situé dans la section avant-gauche de l'instrument
- Surlignez **Sauvegarde** et appuyez sur **Enter** trois fois pour confirmer
- Si une erreur se produit durant la sauvegarde, veuillez recommencer la procédure en utilisant une **nouvelle disquette pré-formatée**
- Une fois la sauvegarde terminée, identifiez la disquette avec le numéro de série de l'instrument et la date de la sauvegarde

Pour toutes vos questions, veuillez contacter l'assistance téléphonique au 1-888-283-0175.

Sincères salutations,

Alicia Carpenter

Responsable de la formation technique

